


# Vexoderm®

Sterilní krytí - Sterilné krytie

ArtinVet Innovative Therapies, S.L.  
Parque Tecnológico 801A, 2º  
48160 Derio - Bizkaia  
España - Spanielsko  
T. 34 94 656 4993  
vexoderm@artinvet.com  
www.artinvet.com

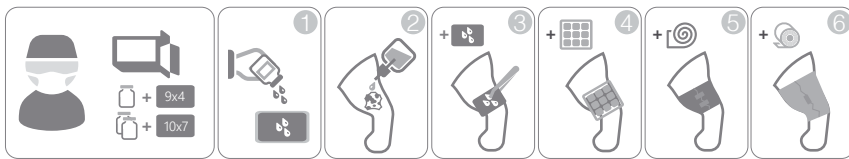

## CZ Sterilní krytí

### Obsah

Vexoderm® sterilní krytí 9x4      Vexoderm® sterilní krytí 10x7  
-1 lyofilizovaná matrice 9x4      -1 lyofilizovaná matrice 10x7  
-1 lékovka hydratačního roztoku      -2 lékovky hydratačního roztoku

\*Poznámka: vzhledem k podmínkám výroby, skutečné rozměry lyofilizované matrice se mohou mírně lišit. Po hydrataci se může matrice zvětšit.

### Popis výrobku

Vexoderm® je sterilní primární krytí používané ke zlepšení hojení kožních ran. Vexoderm® se skládá z lyofilizované matrice, s vysokou absorpční schopností, která upravuje vlhkost a roztoku s dermoprotektivními vlastnostmi.

### Doporučení k použití

Vexoderm® by měl být měněn každých 7 dní. V případě nekrotických nebo velmi exsudativních ran, kontrolujte ránu po 3–5 dnech. Je velmi důležité udržovat správnou vlhkost a teplotu. Krytí lze přiložit na ránu, kteroukoli stranou.

### Pokyny pro uživatele

#### První použití přípravku Vexoderm®

1. Hydratujte matici použitím celého obsahu lékovky s hydratačním roztokem. Absorpce celého roztoku maticí bude trvat přibližně 60". Získá se úroveň hydratace 50%.
2. Ránu očistěte pomocí roztoku Ringer-laktátu nebo běžného fyziologického roztoku.
3. Vexoderm® aplikujte přímo na postiženou oblast pokožky.
4. Pro udržení úrovně vlhkosti překryjte sekundárním krytím (parafinová gáza nebo průhledný polyuretanový film). V případě potřeby, k zajištění správné fixace, použijte lepicí pásku.
5. Sekundární krytí překryjte vatou, abyste udrželi správnou teplotu.
6. K ochraně a udržení celého krytí na místě použijte obvaz a lepicí pásku nebo samofixační elastický obvaz.

#### Následné výměny Vexoderm®

- Vexoderm® je snadno snímatelný a nepřílně k lůžku rány.
- A. Krytí opatrně sejměte.
  - B. Odstraňte exsudát vlašným roztokem Ringer-laktátu nebo běžným fyziologickým roztokem, aniž byste se dotýkali lůžka rány.
  - C. Opakujte kroky 1 až 6 až do úplného uzavření.

### Uchovávaní

Uchovávejte při pokojové teplotě na suchém místě.

## SK Sterilné krytie

### Obsah

Vexoderm® sterilné krytie 9x4      Vexoderm® sterilné krytie 10x7  
-1 lyofilizovaná matrica 9x4      -1 lyofilizovaná matrica 10x7  
-1 liekovka s hydratačným roztokom      -2 liekovky s hydratačným roztokom

\*Poznámka: vzhľadom na podmienky výroby, skutočné rozmery lyofilizovanej matrice sa môžu mierne líšiť. Po hydratacii môže matrica expandovať.

### Popis produktu

Vexoderm® je sterilné primárne krytie používané k zlepšeniu hojenia kožných rán. Vexoderm® sa skladá z lyofilizovanej matrice s vysokou absorpčnou schopnosťou, ktorá reguluje vlhkosť a roztoku s dermoprotektívnymi vlastnosťami.

### Odporúčania na použitie

Vexoderm® by mal byť menený každých 7 dní. V prípade nekrotických alebo veľmi exsudatívnych rán, kontrolujte ranu po 3-5 dňoch. Je veľmi dôležité udržiavať správnu vlhkosť a teplotu. Krytie aplikujete priamo na ranu ktoroukoľvek stranou.

### Pokyny pre používateľa

#### Prvé použitie prípravku Vexoderm®

1. Hydratujte maticu pomocou celého obsahu liekovky s hydratačným roztokom. Absorpcia celého roztoku maticou bude trvať približne 60". Získa sa úroveň hydratacie 50%.
2. Ranu očistite pomocou Ringer-laktátu alebo bežného fyziologického roztoku.
3. Vexoderm® aplikujte priamo na postihnutú oblasť pokožky.
4. Pre udržanie úrovne vlhkosti zakryte sekundárnym krytím (parafínová gáza alebo priehľadný polyuretánový film). V prípade potreby, na zabezpečenie správnej fixácie, použijte lepiacu pásku.
5. Sekundárne krytie zakryte bavlnou, aby ste udržali správnu teplotu.
6. Na ochranu a udržanie celého krytia na mieste použijte obvaz a lepiacu pásku alebo samofixačný elastický obvaz.

#### Následné výmeny Vexoderm®

- Vexoderm® je ľahko snímateľný a nepriľne k lôžku rany.
- A. Krytie opatrne odstráňte.
  - B. Odstráňte exsudát vlašným roztokom Ringer-laktátu alebo fyziologickým roztokom, bez toho aby ste sa dotýkali lôžka rany.
  - C. Opakujte kroky 1 až 6 až do úplného uzavretia.

### Uchovávanie

Uchovávejte pri izbovej teplotě na suchom mieste.